

NORA BODE

# OXYJET LEO COOL



従来の「OXY jet LEO」に、  
下記の機能が追加されました。

## ピュア酸素クーリング

それに伴い下記のパーツが追加されます。

## オキシクールアプリケーション



### 特 徴

オキシクールアプリケーション一式を本体に装着し、アプリケーションヘッドに専用美容液 (INTACT) を差し込み、トリートメントを行います。高濃度酸素と専用美容液により、お肌温度をMAX10℃まで冷却し、オキシジェットアプリケーションで注入した美容成分を定着させます。

### 使用方法

- ①酸素量を1分当たり0.2リットルに調節します。
- ②酸素流量調節ダイヤルを、ディスプレイの数字が点滅を始めるまで長押しします。
- ③酸素流量調節ダイヤルを回して選択し、ダイヤルを押して流量を決定します。
- ④美容液 (INTACT) の3分の1の量を手に取り、お顔に塗布をします。
- ⑤クールアプリケーションヘッドの美容液差し込み口に、残りの美容液 (INTACT) を差し込みます。
- ⑥アプリケーションボタンを押して圧力噴射 (トリートメント) を開始します。酸素が流れ、美容液とともに噴射されます。

※アプリケーションヘッドは肌に対し垂直に当てゆっくりと円を描くように動かします。

アプリケーションヘッドと肌を密着させないと、美容液が噴射されません。

アプリケーションヘッドを肌に強く押し付けないでください。

### スターターキット

#### +オキシクールアプリケーション (新機能)



#### BEAUTY-TOX (オキシジェット/オキシスプレーガン/オキシ吸引化粧品)



ビューティートックス  
ウルトラ  
20ml



オキシフルイド  
マスク  
150ml



クールモイスタチャー  
マスク  
500ml



ヒアルロン  
アンピュール  
6×4ml

#### INTACT (オキシクール美容液)



ヴォリューム  
コンセントレート  
20×4ml



ライト  
コンセントレート  
20×4ml

#### INTACT (オキシジェット美容液)



アイゼン  
コンセントレート  
20ml



リップフイラー  
コンセントレート  
20ml